

 **disty**

distyNotruf

Der Lebensretter am Arm.



**Notruftaster
für Ihr
schnurloses
Telefon!**

Bedienungsanleitung.

Zertifiziertes
Produkt



in Deutschland hergestellt

www.disty.de

Inhaltsverzeichnis

distyNotruf	3
Verpackungsinhalt	5
Inbetriebnahme	6
Aufladen	6
Einbuchen	6
Rufnummern speichern	7
Funktionsweise	9
Direktruf tätigen	9
Meldekette/Alarmbestätigung	9
Zurücknehmen eines Direktrufs/Alarms	9
Anrufe annehmen	10
Reichenweitenwarnung	10
Lautstärke	10
Problembehebung	11
Trageversionen	14
Technische Daten	16
Werkseinstellung	17
Sicherheitshinweise	18
Konformitätserklärung	19

Herzlichen Glückwunsch!
**Mit distyNotruf haben Sie ein DECT/GAP-
Telefonzusatzgerät erworben, das Sie ganz
einfach per Knopfdruck bedienen**

**distyNotruf ist die direkte Verbindung zu Ihren
Vertrauenspersonen**

Sie legen fest, mit wem Sie im Notfall direkt sprechen möchten. Dazu können bis zu 5 Telefonnummern gespeichert werden. Dafür muss **distyNotruf** zuvor in die DECT-Basisstation Ihres Telefons eingebucht werden (siehe Seite 6).

Sobald Sie den Alarmknopf für 1 Sekunde drücken, wählt **distyNotruf** automatisch die erste der einprogrammierten Telefonnummern an und Sie können direkt sprechen. Der Empfänger muss mit Drücken der „#“ -Taste an seinem Telefon die Anrufannahme bestätigen. Erfolgt diese Bestätigung nicht, weil der Empfänger nicht da ist, besetzt ist oder der Anrufbeantworter anspringt, dann wählt **distyNotruf** automatisch die nächste gespeicherte Rufnummer so lange, bis der Notruf persönlich angenommen und bestätigt wird.

distyNotruf als Telefon mit Freisprechfunktion

distyNotruf können Sie auch als Telefon nutzen. Alle eingehenden Anrufe können Sie mit einem Knopfdruck annehmen. So sind Sie jederzeit erreichbar, von jedem Platz Ihres Zuhauses aus. Sogar im Garten oder Keller können Sie **distyNotruf** nutzen.* **distyNotruf** ist strahlwassergeschützt und kann auch in der Dusche genutzt werden.

Einfache Einspeicherung der Rufnummern

Wir übernehmen für Sie kostenlos und komfortabel die Einspeicherung der Notrufnummern. Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 7.

distyNotruf mit Clip immer am Körper tragen

Auf Knopfdruck kommunizieren Sie sofort bei Unwohlsein/Angst, gesundheitlichen Problemen, Überfall, Sturz etc.



Verpackungsinhalt



Netzteil/Ladekabel



Halsband



Gürtelclip



distyNotruf mit Armband



Bedienungsanleitung

* bis 50 Meter von der Basis in Gebäuden

Inbetriebnahme

Aufladen

Vor Inbetriebnahme muss **distyNotruf** vollständig aufgeladen werden (mindestens 4 Stunden). Zuerst das Ladekabel an den **distyNotruf** stecken und mit dem Netzteil verbinden und dann in eine Steckdose stecken.

distyNotruf ist vollständig aufgeladen, wenn die rote LED erloschen ist.

Einbuchen

Bevor Sie mit **distyNotruf** telefonieren können, muss **distyNotruf** sich mit der Basisstation Ihres DECT-Telefons verbinden: das sogenannte Einbuchen. Dazu wird die Basisstation Ihres normalen DECT-Telefons über die Pagingtaste für das Einbuchen Aktiviert (siehe Bedienungsanleitung der Basisstation). Den **distyNotruf** mit dem Ladekabel verbinden und mit Spannung versorgen. Nun die Taste so lange drücken (10 Sek.), bis die grüne LED aufleuchtet. Taste innerhalb von 5 Sekunden loslassen. Jetzt blinkt die grüne LED, d. h. **distyNotruf** sucht eine einbuchbereite Basisstation.



Nach erfolgreichem Einbuchen ertönt ein hoher Signalton. Damit ist der Einbuchvorgang abgeschlossen.

Rufnummern speichern

Für das Programmieren stehen drei Verfahren zur Verfügung („Erster kommender Anruf“ oder über das Servicetelefon oder selbst programmieren).

„Erster kommender Anruf“ (eine Notrufnummer speichern) (Ladekabel nicht gesteckt)

Bitten Sie die Person (z. B. einen Angehörigen, einen Nachbarn), die Sie auf Knopfdruck erreichen wollen, bei Ihnen anzurufen. Dadurch wird die Rufnummer des Anrufers (CLIP) nach dem Einbuchen als Notrufnummer gespeichert. Das erfolgreiche Speichern der Notrufnummer erkennen Sie daran, dass **distyNotruf** sofort nach Anrufannahme die Verbindung wieder beendet. Sollten Sie dieses Verfahren nicht unmittelbar durchführen können, so schließen Sie **distyNotruf** an das Ladekabel an. Dadurch vermeiden Sie die ungewollte Speicherung einer Notrufnummer.

Über das disty-Servicetelefon (mehrere Notrufnummern speichern)

Notrufnummern (bis zu 5 Stück) und Parameter programmieren wir gern kostenfrei für Sie ein.

1. Notieren Sie die gewünschten Zielrufnummern inkl. Vorwahlen (bis zu 5 Stück), am besten auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.
2. Drücken Sie die Notruftaste. Ist Ihr **distyNotruf** eingebucht, rufen Sie so automatisch das Servicetelefon an*.
3. Nennen Sie nacheinander die notierten Rufnummern.
4. Anschließend werden Ihre gewünschten Einstellungen vorgenommen. **Wichtig:** Die Telefonverbindung währenddessen nicht unterbrechen!
5. Fertig

Selbstprogrammieren

Dazu müssen Sie den **distyNotruf** zum Programmieren für jede einzelne Notrufnummer anrufen und eine Verbindung aufbauen. Dabei sollte der **distyNotruf** nicht im selben Raum sein, wie das anrufende Gerät. Wählen Sie dann auf dem externen Gerät die auf der Rückseite beschriebenen Tastenkombinationen.

distyNotruf ist nun betriebsbereit.

* nur innerhalb Deutschland

Zur Sicherheit können Sie jetzt die eingegebenen Nummern überprüfen: Drücken Sie die Notruftaste. Ihr **distyNotruf** wählt nun alle gespeicherten Nummern der Reihe nach an. Bei Unklarheiten rufen Sie uns mit Ihrem normalen Telefon an.

Funktionsweise

Direktruf tätigen

Drücken Sie die Alarmtaste für mindestens 1 Sekunde. **distyNotruf** wählt nun die erste der hinterlegten Telefonnummern. Die rote LED blinkt und zeigt, dass die Verbindung aufgebaut wird.

Meldekette/Alarmbestätigung

Die Annahme des Direktrufs muss von dem Empfänger bestätigt (quittiert) werden, indem er die „#“-Taste auf seinem Telefon drückt. Der Angerufene wird durch eine Ansage zum Bestätigen aufgefordert. Wird der Notruf von der angerufenen Person nicht innerhalb von 20 Sekunden bestätigt, wählt **distyNotruf** automatisch die zweite – und im Fall der Nichtannahme die nächste hinterlegte Telefonnummer. Dies wiederholt sich so lange, bis eine persönliche Sprachverbindung zu einer Ihrer Vertrauenspersonen hergestellt werden konnte.

#

Diese Taste müssen die Empfänger Ihres Anrufs drücken, um den Direktruf anzunehmen. (So wird vermieden, dass „nur“ ein Anrufbeantworter angeht). Sagen Sie das bitte Ihren Rufpartnern!

Zurücknehmen eines Direktrufs/Alarms

Sollten Sie versehentlich einen Alarm ausgelöst haben, drücken Sie einfach die Alarmtaste erneut für 1 Sekunde.

Anrufe annehmen

Alle eingehenden Anrufe können Sie komfortabel über die Taste annehmen. Ein eingehender Anruf wird am **distyNotruf** durch die grün blinkende LED und durch Pieptöne signalisiert.

Reichenweitenwarnung

Bewegen Sie sich mit **distyNotruf** an der Reichweitengrenze, erfolgt ein Warnton.

Lautstärke

Die Lautstärke des Lautsprechers kann angepasst werden. Rufen Sie dazu den disty Service an.



Problembhebung

Wenn ich auf den Alarmknopf drücke, um einen Alarm auszulösen, passiert nichts

- Prüfen Sie, ob die LED Rot blinkt. Dann ist Ihr **distyNotruf** nicht mit der Basisstation verbunden. Beachten Sie, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befinden müssen/max. Reichweite: 50 m.
- Prüfen Sie, ob **distyNotruf** ausreichend geladen ist. Ich kann einen Alarm auslösen, bekomme aber keine Sprechverbindung

- Beachten Sie, dass sich **distyNotruf** im Empfangsbereich der Basisstation befindet (bis zu 50 m im Gebäude und bis zu 300 m im Freien).
- Prüfen Sie, ob **distyNotruf** ausreichend geladen ist.
- Evtl. liegt eine Telefonnetzstörung vor. Bekommen Sie mit Ihrem normalen Telefon auch keine Verbindung, so liegt eine Telefonnetzstörung vor.



Modus Laden	Leuchtdiode/Ton	
Mit dem Ladekabel verbinden	Signalton, rote LED leuchtet einmal	
Mit dem Ladekabel verbunden	Rote LED blinkt während des Ladevorganges und erlischt, wenn das Laden abgeschlossen ist (Blinkrhythmus einmal pro Sekunde)	

Modus	Leuchtdiode/Ton	
Akkuladung niedrig	Rote LED blinkt alle 30 Sek., Signalton	
Eingebucht, registriert	Grüne LED blinkt einmal alle 10 Sek.	
Eingebucht, außerhalb der Reichweite/ keine Basisstation	Rote LED blinkt im Sekundentakt	
DECT-Verbindung	Grüne LED leuchtet	
Alarm	Rote LED blinkt schnell	
Ankommender Anruf	Grüne LED blinkt Signalton einmal	
Reichweite (Grenze)	Rote LED blinkt schnell Signalton	



Trageversionen


Der **distyNotruf** kann auf drei unterschiedliche Arten am Körper getragen werden:



Möglichkeit 1: Befestigung des disty Notruf am Handgelenk.

Das Armband ist bereits werksseitig vormontiert. Der **distyNotruf** ist so am Arm anzulegen, dass die Ladebuchse in Richtung Körper zeigt. Das kürzere Ende des Armbandes ist durch die Öffnung der anderen Armbandhälfte zu ziehen und entsprechend der Armdicke festzuziehen. Die beiden Zapfen des Verschlussstückes sind fest in die gegenüberliegenden Löcher einzudrücken und einzurasten.

Bei einer möglichen Demontage drückt man von der Außenseite der Bohrung mit einer Nadel oder einer Büroklammer auf den Federstift, so dass dieser zusammengedrückt wird und aus der Bohrung entnommen werden kann. Das vormontierte Armband kann durch ein handelsübliches 22 mm-Uhrenarmband ersetzt werden.

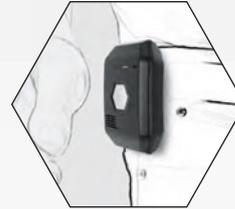


Möglichkeit 2: Befestigung mit dem Clip.

Armband demontieren (siehe Absatz zu Möglichkeit 1) Federstifte aus dem Armband entfernen und ein Federstift auf der Seite der Ladebuchse einsetzen



Mittlere Lasche des Clips bis auf die Clipunterseite durchdrücken und unter den montierten Federstift schieben. Zweiten Federstift in den Clip einschieben Clip in die annähernde Endposition bringen, dabei die eine Seite des Federstiftes in die dafür vorgesehene Bohrung einschieben. Die zweite Seite des Federstifts in Richtung Clip eindrücken und dabei den Clip in die endgültige Position drücken.

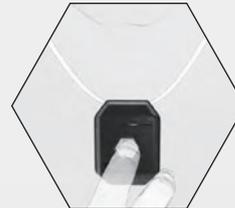

Möglichkeit 3: Befestigung mit dem Halsband.

Zuerst den Clip wie vor beschrieben montieren. Halsband unter die äußere Lasche schieben

Technische Daten

- DECT-GAP, EN 300 444
- Kompatibel zu allen Consumer DECT/GAP-Basisstationen
- Kompatibel zu allen professionellen DECT-Systemen
- Kompatibel zu FRITZ!Box und Speedport Neo
- Schutzklasse IP65
- Lautsprecher
- Mikrofon
- Stand-by: > 120 Std.
- Gesprächszeit: > 4 Std.
- Schnittstelle für Ladung und Programmierung
- LED zur Betriebsanzeige (2-farbig)
- Taste für Notruf und Bedienung
- Lithium-Ionen Akku
- Kapazität: 450 mAh
- Betriebstemperatur: -10°C bis +35°C (beim Laden)
- Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
- Kunststoffgehäuse, 56 x 42 x 14 mm
- Gewicht ca. 29 g

Rücksetzen

Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen können wieder auf den Auslieferungszustand rückgesetzt werden. Die programmierten Notrufnummern bleiben erhalten. Führen Sie dazu bitte folgende Schritte aus (dazu muss **distyNotruf** eingebucht sein):

- **distyNotruf** mit dem Ladekabel verbinden, als Bestätigung leuchtet die rote LED auf und ein akustisches Signal ertönt
- nach spätestens 5 Sek. die Alarmtaste drücken und für 10 Sek. gedrückt halten
 - die grüne LED geht an
- Alarmtaste loslassen, bevor die LED ausgeht (5 Sek. Zeit)
- ein 450 Hz-Ton ist zu hören und die rote LED geht an
 - **distyNotruf** vom Ladekabel entnehmen
 - **distyNotruf** geht in „power down“ (alles aus)

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und überprüfen Sie vor der ersten Benutzung den Verpackungsinhalt.

1. **distyNotruf** ist für die Kommunikation in einer DECT-Installation vorgesehen.
2. Heben Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.
3. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.
4. Nutzen Sie das Gerät nicht in extremen Umgebungsbedingungen.
5. **distyNotruf** ist gegen Spritzwasser geschützt und kann in der Dusche genutzt werden. Nicht in Wasser eintauchen.
6. Halten Sie das Gerät niemals direkt ans Ohr! Der Schalldruck des Lautsprechers könnte Ihr Hörvermögen beeinträchtigen.
7. Verwenden Sie für den Ladevorgang nur das mitgelieferte Netzteil.
8. Das Gerät wird mit einem Lithium-Ionen Akku betrieben. Laden Sie **distyNotruf** regelmäßig und vollständig auf.
9. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu zerlegen oder zu reparieren. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen durch gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
10. **Vorsicht** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Anleitung.

Konformitätserklärung

Wir, die disty communications GmbH, erklären, dass **distyNotruf** mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE) übereinstimmt. Die Übereinstimmung ist durch das CE Kennzeichen bestätigt.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf unserer Internetseite eingesehen werden: www.disty.de

Professionelle Anwender finden weitere Informationen im Downloadbereich unter www.disty.de



Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter: www.disty.de

Servicetelefon: 04 31 • 3 64 58 22

Mo.–Fr. von 9.00 - 16.30 Uhr (außer an Feiertagen)

Für Ihre persönliche Übersicht

Gespeicherte Personen/Rufnummern:

	Name	Tasten*	Telefonnr.	Taste
1		**92		#
2		**961		#
3		**962		#
4		**963		#
5		**964		#

*Tastenkombination zum Selbstprogrammieren



disty communications GmbH

Holzoppelweg 14 • 24118 Kiel

Telefon 04 31 - 3 64 58 01

Servicetelefon: 04 31 - 3 64 58 22

www.disty.de